

CARBON FLEX

Federpaket Carbon Flex 16mm



Soft - Auslenkung von bis zu **20°** möglich



Medium - Auslenkung von bis zu **10°** möglich

Auszug Gebrauchsanweisung Carbon Flex 16mm:

Bei Verwendung des **Federpakets medium** ist das Gelenk auf **maximal 10° Auslenkung** einzustellen. Mit dem beiliegenden 10° Begrenzungswerkzeug die M5 Madenschraube so weit in den Gelenkkörper einschrauben, bis das Werkzeug den Gelenkkörper berührt. Damit wird sichergestellt, dass das Gelenk auf 10° Auslenkung eingestellt wurde. Eine Kontrolle der Auslenkung muss über die Winkelskala am Fußbügel erfolgen. Nach erfolgter Einstellung am Patienten ist die Schraubensicherung der M5 Madenschraube zu prüfen und ggf. mit Loctite 423 erneut zu sichern.

